





Installasjonsveiledning

RadiForce® RX440

LCD-fargeskjerm

SIKKERHETSSYMBOLER

I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

 ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til alvorlig eller livstruende personskade.	 FORSIKTIG Dersom informasjonen i en FORSIKTIG-melding ikke overholdes, kan det føre til moderat personskade og/eller skade på eiendom eller produktet.
 Angir en forbudt handling.	 Angir en obligatorisk handling som må utføres.

FORSIKTIGHETSREGLER

 **ADVARSEL**

Hvis det kommer røyk fra enheten, hvis det lukter brent eller hvis du hører rare lyder fra enheten, må du umiddelbart koble fra alle strømkontakter og kontakte forhandleren.

Dersom du forsøker å bruke en skadet enhet, kan det føre til brann, elektrisk støt eller skade på utstyret.

Bruk den vedlagte strømkabelen og koble den til det standard strømuttaket.

Forsikre deg om at spenningen i uttaket ikke er høyere enn spenningen som er godkjent for strømkabelen. Dersom spenningen i uttaket er høyere enn spenningen som er godkjent for kabelen, kan det føre til brann eller elektrisk støt.

“Strømforsyning: 100-120/200-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz”


 **Hold små gjenstander unna enheten, og ikke la enheten komme i kontakt med væsker.**

Dersom små gjenstander faller ned i ventilasjonsåpningene og inn i kabinettet, eller dersom det kommer væske ned i kabinettet, kan det føre til brann, elektrisk støt eller skade på utstyret. Hvis en gjenstand eller væske kommer inn i kabinettet, må du umiddelbart koble fra enheten. Få en kvalifisert servicetekniker til å kontrollere enheten før den tas i bruk igjen.

 **Bruk enheten på et egnet sted.**

Hvis ikke kan det føre til brann, elektrisk støt eller skade på utstyret.

- Ikke plasser enheten utendørs.
- Ikke plasser enheten i transportsystemer (skip, fly, tog, biler osv.).
- Ikke plasser enheten i støvete eller fuktige omgivelser.
- Ikke plasser enheten på steder der det kan komme vann på skjermen (badeværelse, kjøkken osv.).
- Ikke plasser enheten på et sted der det kommer damp direkte på skjermen.
- Ikke plasser enheten i nærheten av varmegenererende utstyr eller luftfuktere.
- Ikke plasser enheten i omgivelser med brennbar gass.

 **Utstyret må kobles til et jordnet strømuttak.**

Hvis ikke kan det føre til brann eller elektrisk støt.

Lamper med fluorescerende bakgrunnslys inneholder kvikksølv (produkter med lamper med LED-bakgrunnslys inneholder ikke kvikksølv). Kast lampene i samsvar med gjeldende miljølovgivning.

 **FORSIKTIG**

 **Kabinettets ventilasjonsåpninger må ikke blokkeres.**


- Ikke plasser gjenstander på ventilasjonsåpningene.
- Ikke installer enheten i et lukket rom.
- Ikke bruk enheten i liggende stilling eller opp ned.

Dersom ventilasjonsåpningene blir blokkert, hindres luftstrømmen. Dette kan føre til brann, kan føre til brann, elektrisk støt eller skade på utstyret.

 **Bruk et lett tilgjengelig strømuttak.**

Dette sikrer at du enkelt og raskt kan koble fra strømmen ved eventuelle problemer.

Plassering av forsiktighetserklæring

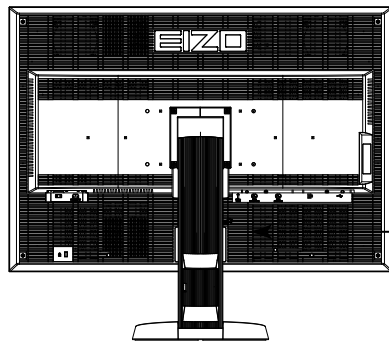

⚡ ⚠
WARNING
 RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.
AVERTISSEMENT
 RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.
WARNING
 GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. RÜCKWAND NICHT ENTFERNEN.
警告
 触电危険、请勿打开后盖。
警告
 感電の恐れあり、カバーをあげないでください。
 The equipment must be connected to a grounded main outlet.
 L'appareil doit être relié à une prise avec terre.
 Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.
 Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.
 设备必须连接到接地式的电源插座。
 電源コードのアースは必ず接地してください。

Kompatible oppløsninger

Skjermen støtter følgende oppløsninger.

√ : Støttet

DisplayPort

Oppløsning	Kompatibelt signal	vertikal skannefrekvens	Dot-klokke	Single (Enkel)		PbyP*1		PinP*1
				Liggende	Stående	Liggende	Stående	Liggende
720×400	VGA TEXT	70 Hz	280 MHz (Max.)	√	√	√	√	√
640×480	VGA	60 Hz		√	√	√	√	√
800×600	VESA	60 Hz		√	√	√	√	√
1024×768	VESA	60 Hz		√	√	√	√	√
1200×1600	VESA	60 Hz		-	-	√	-	-
1280×1024	VESA	60 Hz		√	√	√	√	√
1280×1600	VESA CVT RB	60 Hz		-	-	√	-	-
1600×1200	VESA	60 Hz		√	√	-	√	√
1600×1280	VESA CVT RB	60 Hz		-	-	-	√	-
1600×2560	VESA CVT RB	60 Hz		-	√	-	-	-
2560×1600	VESA CVT RB	60 Hz		√	-	-	-	√

DVI-1 / DVI-2


Oppløsning	Kompatibelt signal	vertikal skannefrekvens	Dot-klokke	Single (Enkel)		PbyP*1		PinP*1
				Liggende	Stående	Liggende	Stående	Liggende
720×400	VGA TEXT	70 Hz	DVI-1 : 280 MHz (Max.) DVI-2 : 165 MHz (Max.)	√	√	√	√	√
640×480	VGA	60 Hz		√	√	√	√	√
800×600	VESA	60 Hz		√	√	√	√	√
1024×768	VESA	60 Hz		√	√	√	√	√
1200×1600	VESA	60 Hz		-	-	√	-	-
1280×1024	VESA	60 Hz		√	√	√	√	√
1280×1600	VESA CVT RB	60 Hz		-	-	√	-	-
1600×1200	VESA	60 Hz		√	√	-	√	√*3
1600×1280	VESA CVT RB	60 Hz		-	-	-	√	-
1600×2560	VESA CVT RB	60 Hz		-	√*3	-	-	-
1600×2560	Single Link	30 Hz		-	√	-	-	-
2560×1600	VESA CVT RB	60 Hz		√*3	-	-	-	-
2560×1600*2	VESA CVT RB	30 Hz	√	-	-	-	√*3	

*1 For nærmere informasjon, se Brukerhåndboken (på CD-ROM-en). Gjeldende signal for sekundærskjermen (Sekundær) for "PinP" avviker.

*2 Single Link

*3 Støttes kun av DVI-1

Symboler på enheten


Symbol	Dette symbolet angir følgende	
	Hovedstrømbryter:	Trykk for å slå av skjermens hovedstrøm.
	Hovedstrømbryter:	Trykk for å slå på skjermens hovedstrøm.
	Strømknapp:	Trykk for å slå skjermen på eller av.
	Vekselstrøm	
	Fare for elektrisk støt	
	FORSIKTIG:	Se avsnittet SAFETY SYMBOLS (SIKKERHETSSYMBOLER) OG PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER).
	WEEE-merket:	Produktet må kastes separat. Materialer kan resirkuleres.
	CE-merking:	Merket for EU-samsvar i henhold til bestemmelsene i Rådskonklusjonen 93/42/EEC og 2011/65EU.

Innhold i pakke


Kontroller at alle de følgende artiklene er inkludert i esken. Hvis noen artikler mangler eller er skadet, må du kontakte din lokale representant for EIZO.

Merk

- Ta vare på esken og emballasjematerialet i tilfelle skjermen må flyttes eller transporteres senere.
 - Skjerm
 - Strømkabel
 - USB-kabel: UU300
 - EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
 - Installasjonshåndbok (denne håndboken)
 - PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER)
 - VESA festeskruer: M4 × 12: 2 stk.
- Digital signalkabel: Skjermport - Skjermport (PP300)
- Digital signalkabel: DVI-D - DVI-D (Dual Link) (DD300DL)

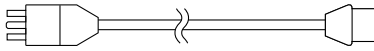

Kontroller og funksjoner

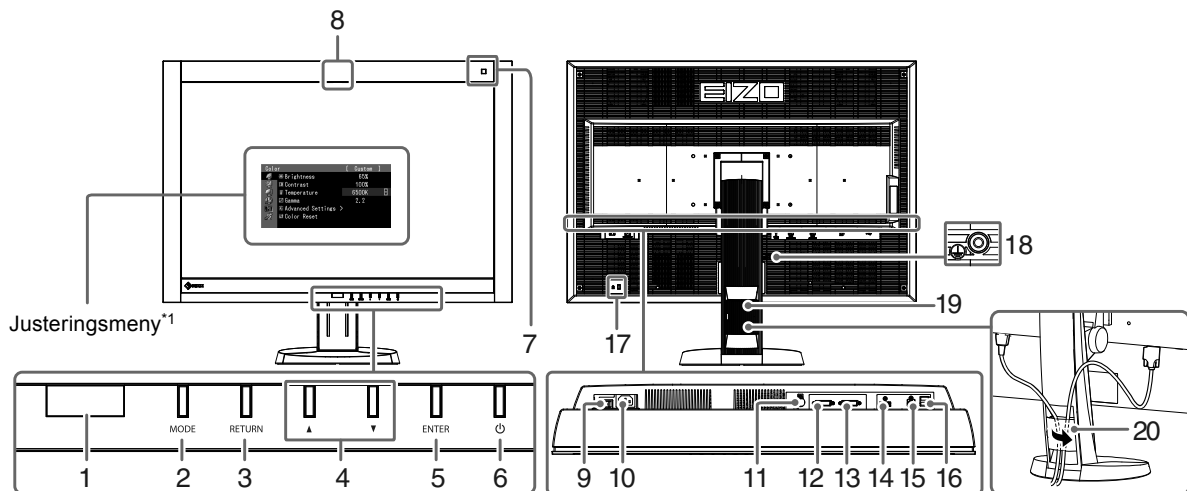

1. Presence Sensor (nærværssensor)	Oppdager om en person beveger seg foran skjermen.
2. MODE -knapp	Endrer CAL Switch-modus.
3. RETURN -knapp	Opphever innstillingen/justeringen og avslutter justeringsmenyen.
4. ▲▼ -knapp	Sørger for menyvalg, så vel som justeringen og innstillingen av en funksjon.
5. ENTER -knapp	Viser justeringsmenyen, definerer et element på menyskjermbildet og lagrer justerte verdier.
6. ⏻ -knapp	<ul style="list-style-type: none"> • Slår strømmen på eller av. • Viser skjermens driftsstatus. Grønt: I drift, Oransje: Strømsparingsmodus, Av: Hovedstrøm/strømknapp
7. Sensor for lys i omgivelsene	Måler lyset i omgivelsene.
8. Integreert frontsensor (lysbildetype)	Brukes til kalibrering og Grayscale Check (gråskalasjeck).
9. Hovedstrømbryter	Slår hovedstrømmen på eller av.
10. Strømkontakt	Kobler til strømkabelen.
11. PS/2-kontakt	Brukes til vedlikehold. Skal ikke brukes til andre formål. Dette kan få skjermen til å slutte å virke som den skal.
12. Innsignalkontakt	DVI-D-kontakt (DVI-2: Single Link)
13. Innsignalkontakt	DVI-D-kontakt (DVI-1: Dual Link)
14. Innsignalkontakt	DisplayPort-kontakt
15. USB-port (oppstrøms)	Tilkobling for USB-kabel for bruk av programvaren som trenger USB-tilkobling, eller for bruk av USB-hub-funksjonen.
16. USB-port (nedstrøms)	Tilkobling for ekstern USB-enhet.
17. Sikkerhetslåsåpning	Kompatibel med Kensingtons MicroSaver-sikkerhetssystem.
18. ⚡ merke	Jordingskontakt
19. Fot	Brukes til å justere høyden og vinkelen på skjermen.
20. Kabelholder	Dekker skjermkablene.

*1 Du finner bruksinformasjon i Brukerhåndboken (på CD-ROM-en).

Koble til kabler

Obs

- Forsikre deg om at skjermen og PC-en er slått av.
- Når du skifter ut den nåværende skjermen med denne skjermen, må du passe på å endre PC-innstillingene for oppløsning og vertikal skannefrekvens til dem som er tilgjengelige for denne skjermen. Se tabellen over kompatible oppløsninger (baksiden av forsiden) før du kobler til PC-en.


Merk

- Når flere PC-er kobles til dette produktet, eller det vises bilder fra to signalkilder samtidig på én PC, se i brukerhåndboken (på CD-ROM).
- Når to signaler vises samtidig ved bruk av funksjonene "PinP" eller "PbyP", vises følgende inngangssignaler på "Main (Hoved)" og "Sub (Sekundær)" skjermene. For detaljer, se brukerhåndboken (på CD-ROM).
 - Hoved: Skjermport eller DVI-1
 - Sekundær: DVI-2

1. Koble signalkablene til innsignalkontaktene og PC-en.


Kontroller tilstanden til kontaktene, og koble til kablene.

Når signalkabelen er koblet til, strammer du skruene på kontaktene for å feste koblingen.

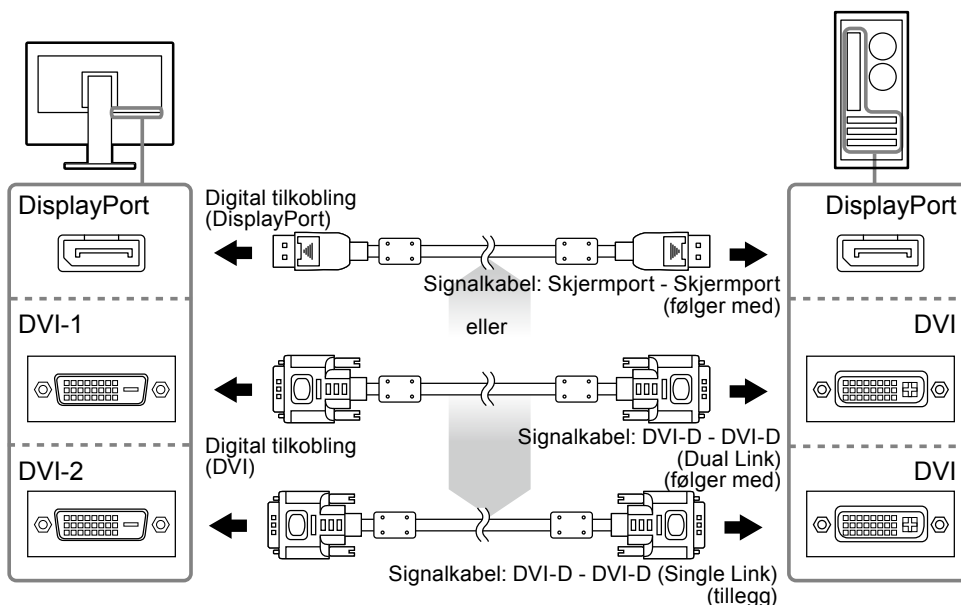

2. Plugg strømkabelen inn i strømutfgangen og strømkontakten på skjermen.

3. Koble til USB-kabelen når du bruker RadiCS LE eller ScreenManager Pro for Medical.

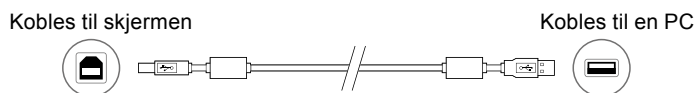

4. Trykk på ⏻ for å slå på skjermen.

Skjermens strømindikator lyser grønt.

5. Slå på PC-en.

Skjermbildet vises.


Hvis det ikke vises et bilde, kan du se "Ikke noe bilde" (side 8) for å få ytterligere råd.

Obs

- Slå av skjermen og PC-en etter bruk.
- For å oppnå maksimal strømbesparelse anbefaler vi at du slår av strømknappen. Hvis du slår av hovedstrømbryteren eller trekker ut strømledningen, stenges strømforsyningen til skjermen fullstendig.

Justere skjermens høyde og vinkel


Hold i venstre og høyre kant av skjermen og juster skjermhøyden og vipp og drei til beste arbeidsstilling.

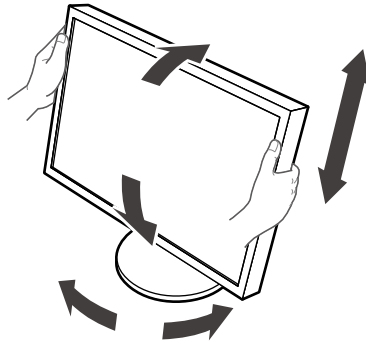


Obs

- Kontroller at kablene er koblet til på riktig måte.

Vise knappeveiledning

Når du trykker på en av knappene på forsiden (bortsett fra -knapp), vises en knappeveiledning over knappen.

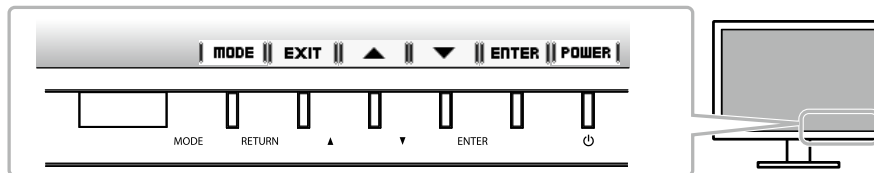

Merk

- Knappeveiledningen vises hele tiden mens justeringsmenyen eller modusmenyen vises.
- Knappeveiledningen vises på ulik måte avhengig av den valgte menyen eller statusen.


Velge skjermmodus

Denne funksjonen gjør det enkelt å velge ønsket modus avhengig av skjermapplikasjon.

√: Kalibrering er tilgjengelig.


Modus	Hensikt	
1-DICOM	Brukes til å vise bilder i DICOM-modus.	√
2-Custom	Kan stilles inn iht. til ditt valg.	√
3-CAL1/4-CAL2/5-CAL3	Viser skjermen justert av kalibreringsprogramvare.	√
6-Hybrid-γ	Identifiserer automatisk visningsområdet for sort/hvitt- og fargebilder på samme skjerm, og viser hver innstilt status.	-
7-sRGB	Passer til fargeavstemming med sRGB-kompatible eksterne enheter.	-
8-Text	Passer til visning av tekst for tekstbehandlingsdokumenter eller regneark.	-
9-ALT ^{*1}	Egnet til å vise fargen med lysstyrken og gråtoner som passer til belysningen i omgivelsene.	-

*1 Elementene som er beskrevet ovenfor kan ikke vises riktig, avhengig av brukermiljøet. Kvaliteten på skjermen kan ikke styres i denne modusen.

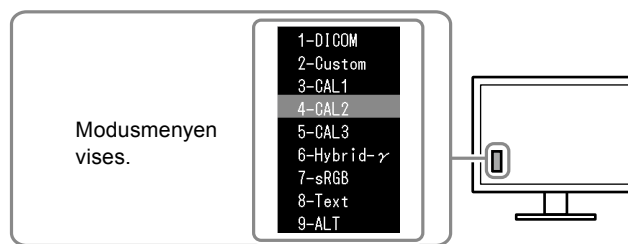

Prosedyre

- Trykk på MODE.
Modusmenyen vises nederst til venstre på skjermen.
- Hver gang du trykker på MODE, utheves neste modus i listen.
Du kan skifte modus med ▲ eller ▼ mens modusmenyen vises.

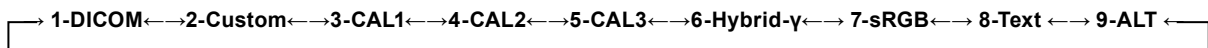

Kontrollere skjermkvaliteten

Kvalitetskontrollprogramvaren "RadiCS LE" (for Windows) følger med denne skjermen.

Installer RadiCS LE for å kalibrere skjermen og administrere kalibreringshistorikken (se RadiCS LE-brukerhåndboken (på CD-ROM-en)). Bruk RadiCS SelfQC-funksjonen og den innebygde integrerte frontsensoren til å utføre periodisk kalibrering og Grayscale Check (gråskalasje) for skjermen på egen hånd. For nærmere informasjon, se Brukerhåndboken (på CD-ROM-en).

Obs


- Koble skjermen til PC-en med en USB-kabel når du bruker RadiCS LE.



Merk

- Hvis du skal utføre avansert kvalitetskontroll som er i overensstemmelse med medisinske standarder, bruker du "RadiCS UX1", en programvarepakke for kvalitetskontroll, som er ekstrastyr.

Ikke noe bilde

Hvis et problem gjenstår etter bruk av de foreslåtte hjelpemidlene, bør du kontakte din lokale representant for EIZO.

Problem	Mulig årsak og tiltak
<p>1. Ikke noe bilde</p> <ul style="list-style-type: none"> Strømindikatoren lyser ikke. 	<ul style="list-style-type: none"> Sjekk om strømkabelen er riktig tilkoblet. Slå på hovedstrømbryteren. Trykk på . Slå av hovedstrømmen, og slå den deretter på igjen noen minutter senere.
<ul style="list-style-type: none"> Strømindikatoren lyser grønt. 	<ul style="list-style-type: none"> Øk "Brightness (Lysstyrke)", "Contrast (Kontrast)" eller "Gain (Forsterkning)" i Justeringsmenyen. Slå av hovedstrømmen og slå den deretter på igjen.
<ul style="list-style-type: none"> Strømindikatoren lyser oransje. 	<ul style="list-style-type: none"> Bytt innsignalet. For nærmere informasjon, se Brukerhåndboken (på CD-ROM-en). Bruk musen eller tastaturet. Sjekk om PC-en er slått på. Når bevegelsessensoren er satt til "Auto" eller "Manual (Manuell)", kan skjermen ha skiftet til strømsparemodus. Plasser deg i nærheten av skjermen.
<ul style="list-style-type: none"> Strømindikatoren blinker oransje og grønt. 	<ul style="list-style-type: none"> Slå av hovedstrømmen og slå den deretter på igjen. Det er et problem med enheten som er koblet til ved bruk av DisplayPort. Løs problemet og slå av og på skjermen. Se Brukerhåndboken til den overførte enheten for flere detaljer.
<p>2. Meldingen nedenfor vises.</p> <ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises når det ikke er noe innsignal. Eksempel: 	<p>Denne meldingen vises når innsignalet er feil, selv om skjermen fungerer.</p> <ul style="list-style-type: none"> Meldingen vist til venstre, kan komme til syne fordi noen PC-er ikke avgir signalet like etter at strømmen er skrudd på. Sjekk om PC-en er slått på. Sjekk om signalkabelen er riktig tilkoblet. Bytt innsignalet. For nærmere informasjon, se Brukerhåndboken (på CD-ROM-en).
<ul style="list-style-type: none"> Meldingen viser at innsignalet er utenfor det angitte frekvensområdet. Eksempel: 	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller om PC-en er konfigurert til å innfri skjermens krav til oppløsning og vertikal skannefrekvens (se "Kompatible oppløsninger"). Start PC-en på nytt. Bytt til en egnet visningsmodus ved hjelp av grafikkortets hjelpeprogram. For nærmere informasjon, se manualen for grafikkortet.

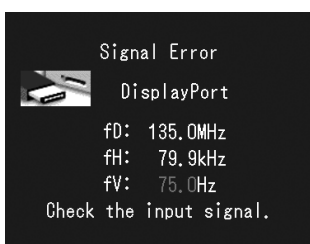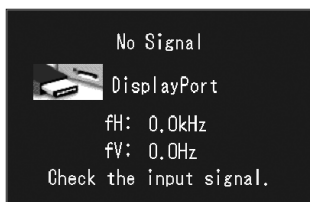

fD: Dot-klokke
fH: Horisontal skannefrekvens
fV: Vertikal skannefrekvens

Ingen deler av denne veiledningen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk eller annet, uten skriftlig forhåndstillatelse fra EIZO Corporation. EIZO Corporation er ikke forpliktet til å holde innsendt materiale eller informasjon konfidensielt med mindre dette er avtalt på forhånd i samsvar med EIZO Corporations mottak av slik informasjon. Selv om vi har gjort alt for å sikre at denne veiledningen inneholder oppdatert informasjon, må du være oppmerksom på at spesifikasjonene for EIZO-skjermen kan endres uten forvarsel.

- Produktspesifikasjoner kan variere avhengig av område. Kontroller spesifikasjonene i veiledningen som er skrevet på det språket som brukes der produktet ble kjøpt.
- Det endelige systemet skal overholde IEC60601-1-1-kravene.
- Strømforsyningsutstyr kan sende ut elektromagnetiske bølger som kan virke inn på eller begrense skjermfunksjonen, eller føre til at skjermen blir ødelagt. Installer utstyret i kontrollerte omgivelser, hvor slike innvirkninger kan unngås.

